



Oxivir Sporicide Wipe CE

Toalhetes para limpeza e desinfecção de largo espectro

Descrição

Oxivir Sporicide Wipe é um toalhete para limpeza e desinfecção num único passo, eficaz contra *Clostridium difficile* e *Bacillus subtilis*. Com uma formulação à base de peróxido de hidrogénio acelerado (AHP), patenteado pela Diversey, Oxivir Sporicide Wipe pode ser usado em dispositivos médicos não invasivos e em superfícies duras não porosas

Propriedades

- Eficaz contra *C. difficile* em 1 minuto*
- Esporocida, Bactericida, Virucida, Leveduricida, Fungicida, em menos de um minuto
- Seguro para os utilizadores e para as superfícies, quando comparado com outros esporocidas
- Poder de limpeza efetivo
- Isento de perfume
- Os agentes ativos dão origem a água e oxigénio - Não deixa resíduos na superfície
- Não contém cloro nem álcool

Benefícios


- Excelente resposta a surtos de *C. difficile*
- Ampla eficácia contra todas as outras classes de agentes patogénicos, proporciona um elevado nível de proteção dos pacientes
- Tempos de contacto reduzidos, assegura uma desinfecção eficaz
- Não necessita de enxaguamento
- Não causa irritação respiratória
- Adequado para usar em zonas de elevado risco, como áreas hospitalares, incluindo UCI, UCIN e enfermarias e quartos de isolamento

Instruções de utilização

Aplicação:

1. Remover a sujidade difícil
2. Abrir a embalagem, retirar um toalhete e fechar a tampa
3. Limpar a superfície, garantindo que toda a superfície é humedecida e deixar secar ao ar
4. Assegurar que a superfície se mantém molhada durante o tempo de contacto
5. Substituir o toalhete, sempre que este não deixar a superfície molhada após a sua passagem; quando estiver visivelmente sujo ou sempre que mudar para outra área a limpar

* Quando usado como desinfetante, após um passo de limpeza em separado

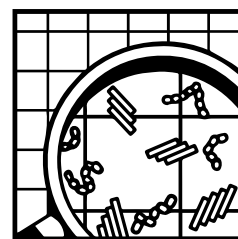

© A.I.S.E.



Oxivir Sporicide Wipe CE

Dados Técnicos

Aspeto: toalhete popipropileno, 25g m2

pH (em uso): $2,7 \pm 0,3$

Densidade relativa (20 °C): 1,03265

Validade: 720 dias

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Reage com substâncias oxidáveis.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto

Devem ser usadas luvas, quando usar Oxivir Sporicide Wipe. Não misturar com outro produtos químicos. Não usar em superfícies sensíveis à água e a ácidos.

Dados microbiológicos

Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN13704, EN14348 e EN16615.

Informação ecológica

Os tensoativos utilizados neste produto são biodegradáveis e estão em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento EC 648/2004, relato aos detergentes.