



Suma Med Rinse Plus

Secante ácido de remolha para instrumentos cirúrgicos

Descrição

Suma Med Rinse Plus é um aditivo para a limpeza de instrumentos cirúrgicos que combina a ação de secante e de desincrustante.

Propriedades

Suma Med Rinse Plus é um secante ácido de remolha para a limpeza de instrumentos cirúrgicos. Especialmente formulado para utilização numa vasta gama de máquinas de lavar e desinfetar e máquinas de lavar louça. Contém uma mistura especial de tensoativos não-iónicos e ácido para uma secagem rápida e sem manchas em todas as superfícies limpas, em águas de qualquer dureza. O produto também é um excelente desincrustante para a remoção de sangue, ferrugem e outras sujidades e nódoas. O produto contém também agentes antiespuma e é bastante eficaz na prevenção da formação do calcário.

Benefícios


- Fórmula única que combina a ação de secante e de desincrustante
- Seca rapidamente sem deixar riscos ou marcas
- Elimina sujidade e sangue ressequido
- Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados de poupança
- Ação com baixo teor de espuma para uma operação mais eficaz

Instruções de utilização

Suma Med Rinse Plus (secante) é normalmente doseado manualmente no reservatório para o secante da máquina de lavar, a uma concentração entre 0,2ml-0,4ml/L.

(Remolha) Dosear 1-2 L de Suma Med Rinse Plus em 10 L de água morna (temperaturas entre os 40-60 °C). Deixar o material imerso durante 10 minutos. Enxaguar de seguida.

Os níveis de dosagem poderão ser alterados de acordo com as condições de cada cliente.

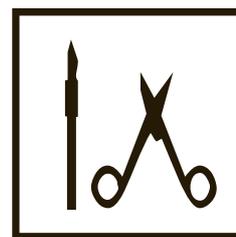

° A.I.S.E.

**Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



Suma Med Rinse Plus

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido incolor, transparente

pH (puro): 2,0

Densidade relativa (20 °C): 1,07

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diverse.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, Suma Med Rinse Plus é adequado para utilização na maioria dos materiais habitualmente encontrados num hospital. Não utilizar o produto concentrado em cobre, alumínio e latão. Não utilizar o produto antes de lavar o tanque e evitar a utilização de bocais em cobre. Dosear o produto através de tudo em aço inoxidável.