



Suma Med Super LpH

Detergente líquido para instrumentos cirúrgicos

Descrição

Suma Med Super LpH é um detergente líquido concentrado para lavagem e enxaguamento especialmente formulado para uma excelente remoção da sujidade em instrumentos cirúrgicos, em condições de águas de dureza baixa a média.

Propriedades

Suma Med Super LpH é um detergente líquido alcalino adequado para utilização numa vasta gama de máquinas de lavar e desinfetar e máquinas de lavar louça. O produto é especialmente indicado para utilização em máquinas de lavar e desinfetar, para a higienização de instrumentos médicos, material de anestesia e frascos de aspiração. O produto também é excelente para a lavagem, em máquinas de lavar e desinfetar, de tinas de lavagem, tabuleiros reniformes e outros tabuleiros portáteis. O produto é também indicado para utilização em máquinas de lavar louça. Contém uma mistura de alcalinos e agentes sequestrantes de calcário, que proporcionam uma excelente remoção da sujidade e previnem a formação de calcário, em condições de águas de dureza baixa a média.


Benefícios

- Remove a sujidade e sangue ressequidos
- Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados de poupança
- Previne a formação de calcário na máquina
- Embalagens pequenas e fáceis de manusear

Instruções de utilização

Suma Med Super LpH é normalmente aplicado através de sistemas de doseamento automático a uma concentração entre 1 ml e 3 ml/L. Inserir o tubo de sucção na embalagem do detergente e o doseamento será feito corretamente.

Os níveis de dosagem poderão ser alterados de acordo com as condições de cada cliente.

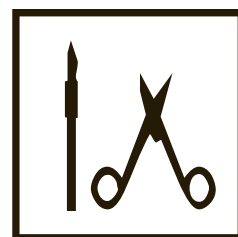

© A.I.S.E.

**Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



Suma Med Super LpH

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido incolor , transparente

pH (solução a 1% a 20 °C): 11,4

Densidade relativa (20 °C): 1,15

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, Suma Med Super LpH é adequado para utilização na maioria dos materiais habitualmente encontrados num hospital. Não utilizar em materiais sensíveis a alcalinos, tais como cobre, latão, alumínio ou borracha.