

Oxivir Excel Wipe Acti

Toalhetes de limpeza-desinfectantes para dispositivos médicos não invasivos e superfícies não porosas

Descrição

O toalhete Oxivir Excel Wipes Acti, com tecnologia AHP, é a escolha ideal para limpeza e desinfecção num só passo. Um toalhete pronto a usar em todas as áreas de utilização para limpar e desinfetar superfícies duras, bem como superfícies de dispositivos médicos não invasivos (apenas para uso profissional).

Propriedades

- Toalhete pronto a usar, ideal para todas as áreas de utilização, incluindo áreas de cuidados de saúde, áreas não relacionadas com cuidados de saúde e áreas alimentares
- Eficácia virucida total
- Eficácia comprovada num um amplo espectro de vírus, bactérias e leveduras
- Limpeza superior com sistema de tensoativos de elevado desempenho
- Sem perfume
- Não é necessário enxaguar
- A substância ativa decompõe-se em água e oxigénio
- Biocida aprovado pelo BPR
- Dispositivo médico certificado



 **Diversey Europe
Operations B.V.**
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Wipe Acti

Benefícios

- Oxivir Excel Wipes Acti proporciona eficácia contra um largo espectro de bactérias, leveduras e vírus em tempos de contacto reduzidos, proporcionando os mais elevados níveis de desinfeção contra múltiplos agentes patogénicos
- Aprovado pelo BPR e extensivamente testado de acordo com as normas europeias
- Oxivir Excel Wipes Acti possui uma eficácia virucida total, incluindo eficácia comprovada contra vírus não envelopados, como Poliovírus, Adenovírus, Murine norovírus e vírus envelopados, como coronavírus, vírus Vaccinia, HIV, HBV, HCV e influenza
- Oxivir Excel Wipes Acti tem um desempenho de limpeza superior devido à capacidade dos tensoactivos que o tornam não só um excelente desinfetante mas também um excelente produto de limpeza
- A fórmula à base de AHP é suave nas superfícies, prolongando a vida útil do equipamento e não deixa resíduos agressivos na superfície
- Oxivir Excel Wipes Acti é adequado para a utilização diária na limpeza e desinfeção de superfícies duras, bem como para uso em superfícies de contacto frequente no retalho, educação, restauração, cuidados de longo prazo e outros sectores, bem como áreas hospitalares como BO, UCI e quartos de pacientes
- Sem necessidade de usar EPI, exceto em caso de utilização prolongada

Instruções de utilização

Toalhete pronto a utilizar, sem necessidade de diluição, utilizar à temperatura ambiente:

- Remover a sujidade grosseira.
- Abrir a tampa, passar um único toalhete e fechar a tampa.
- Aplicar o produto molhando totalmente a superfície não porosa e/ou o dispositivo médico não invasivo.
- Deixar atuar durante 5 minutos.
- Deixar secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície.
- Lavar as mãos após o manuseamento.

Taxa de aplicação: 1,5 m² por toalhete.

Dados Técnicos

Aspeto:	Toalhete branco
Odor:	Neutro
pH (puro):	<2
Validade:	2 anos após a produção (Prazo de validade: ver embalagem) 28 dias após a abertura
Substância ativa:	0,36% de peróxido de hidrogénio

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Oxivir Excel Wipe Acti

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diversey.com>. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais. Não misturar com outros produtos, exceto se aconselhado pela Diversey. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. O produto não está destinado a ser reutilizado. Apenas para uso profissional / especialistas.

Atenção

Armazene dentro da seguinte faixa de temperatura: 6°C - 35°C. Não use se a embalagem estiver danificada. Mantenha longe da luz solar. Manuseie seguindo as boas práticas de segurança e higiene profissional. Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais. O produto não se destina a ser reutilizado. Advertência: Pode ser corrosivo para os metais.

Equipamento de proteção pessoal

As orientações completas sobre EPI para este produto são fornecidas numa Ficha de Dados de Segurança separada; sds.diversey.com.

EPI: Utilizar equipamento de proteção individual conforme necessário. **Proteção das mãos:** Lavar e secar as mãos após a utilização. Em caso de contacto prolongado, pode ser necessária proteção da pele.

Considerações relativas à eliminação

São fornecidas orientações completas sobre a eliminação deste produto numa Ficha de Dados de Segurança separada; sds.diversey.com.

Compatibilidade do produto

Oxivir Excel Wipes Acti destina-se a ser utilizado como desinfetante de superfícies duras, incluindo superfícies duras de dispositivos médicos não invasivos. Nas condições de utilização recomendadas, o Oxivir Excel Wipes Acti é adequado para utilização em superfícies como aço inoxidável, cromado, vinil, tecidos de nylon, superfícies laminadas, vidro, borracha, plásticos duros e flexíveis (polipropileno, poliuretano, polietileno, PVC acrílico, fibra de vidro e policarbonato). Não são recomendadas outras utilizações para além das identificadas. O Oxivir Excel Wipes Acti não se destina a ser utilizado em dispositivos médicos invasivos. **Não misturar com outros produtos. Não se destina a superfícies porosas ou sensíveis a ácidos.**

Oxivir Excel Wipe Acti

Dados microbiológicos

Área de utilização: PT2 Cuidados de saúde em condições de sujidade, PT2 Não cuidados de saúde em condições de sujidade & PT4 Superfícies de contacto com alimentos em condições de sujidade

Aplicação	Eficácia	Norma EN	Organismos	Diluição	Tempo de contacto
Limpeza com toalhete	Bactericida	EN 13727 EN 1276 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	Pronto a usar	5 min
	Leveduricida	EN 13624 EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Virucida	EN 14476	Adenovírus, Murine norovírus, Poliovírus		

Informação ecológica

Os tensioactivos utilizados neste produto são biodegradáveis, em conformidade com os requisitos do Regulamento relativo aos detergentes da UE, CE 648/2004.

Recomendações

- Biocida: BPR EU-0032483-0003 1-3
- Organismo notificado para dispositivos médicos: CE0044

Embalagem disponível

Código	Descrição	Sistema
9316225	OXIVIR EXCEL WIPES ACTI 12X100PC W4940	Wipes

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.27/11/2025 pt-PT (K02979)